

VERBETERD



Self-sticking tender tape

SPITA
ResQ-plast®

PROFESSIONAL

- Hecht niet aan huid of haar
- Blijvend ademend
- Zelfhechtend
- Voorkomt pleisterallergie



- Blijvend elastisch
- Afwasbaar
- Bestand tegen zalf, olie en vet
- Hecht ook uitstekend onder water


PIJNLOOS VERWIJDERBAAR



SNEL EN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN



Om een wondkussen te maken, vouwt u het eerste deel om, en eventueel nog een keer, zodat de gewenste dikte ontstaat. Het wondkussen dient minimaal de bloedende wond te kunnen bedekken.

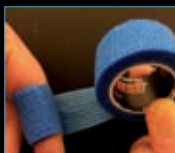

Het wondkussen op de wond plaatsen en vervolgens **SPITA ResQ-plast** iets uitrekken en gelijkmatig omwikkelen. De wikkelingen (ca 4-5) dienen van links naar rechts (of rechts naar links) elkaar (kruislings) te overlappen, waar-na u de band kunt afscheuren. Het einde stevig op de onderliggende laag aandrukken voor een goede hechting.



www.spita.nl

SPITA
ResQ-technology

De universele en gebruiksvriendelijke zelfhechtende pleister!

SPITA ResQ-plast, op basis van zuiver katoen, is een hoogwaardig, medisch getest, zelfhechtend pleistermateriaal. Er zijn geen andere stoffen (zoals latex) toegevoegd, waardoor SPITA ResQ-plast bij uitstek geschikt is voor mensen met een allergie voor latex of de lijm op standaard pleisters. Omdat SPITA ResQ-plast alleen aan zichzelf hecht, kunt u het op natte en vervuilde huid aanbrengen. Ingeval van een (ernstige) bloeding kunt u SPITA ResQ-plast direct aanbrengen, zodat de bloeding zo snel mogelijk wordt gestopt. Wanneer u bij het aanbrengen SPITA ResQ-plast iets uitrekt, terwijl u de band half overlappend omwikkelt, hecht het materiaal vrijwel direct aan zichzelf, ongeacht de ondergrond. Het materiaal blijft flexibel waardoor de bewegingen van uw gewrichten niet worden belemmerd.

SPITA ResQ-plast functioneert ook uitstekend onder water (!) en zal niet loslaten tijdens het douchen of zwemmen. SPITA ResQ-plast is daarom ook uitstekend te gebruiken bij natte werkzaamheden (afwaswater, spoelwater, enz.), waarbij bijvoorbeeld uw handen veelvuldig nat worden, zoals o.a. bij koks, slagers, loodgieters en brandweerlieden veelvuldig voorkomt.

SPITA ResQ-plast is uitstekend toepasbaar bij:

- | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| ✓ (bloedende) wonden aan vingers, tenen, enz. | ✓ Blaren | ✓ Ingescheurde nagels |
| ✓ Snijwonden | ✓ Als drukverband | ✓ Natte en/of vette huid |
| | ✓ Gewrichtsblessures | ✓ Dieren (kleeft niet aan de vacht) |

Gebruiksaanwijzing vingertop inpakken:



SPITA ResQ-plast over de vingertop aanbrengen.



SPITA ResQ-plast van achter naar voren wikkelen.



Na 4-5 omwikkelingen SPITA ResQ-plast afscheuren en eind stevig aandrukken.



Op deze wijze kunt u uw vingertop ook beschermen tegen scherpe voorwerpen.

WAARSCHUWING: Indien u SPITA ResQ-plast te strak omwikkelt, kan de bloedcirculatie worden gehinderd. In dit geval het materiaal afwikkelen en vervolgens minder strak aanbrengen.

TIP: SPITA ResQ-plast is langdurig houdbaar. Bewaar SPITA ResQ-plast in de bijgeleverde (herschuitbare) blister om onnodige vervuiling van het pleister materiaal te voorkomen.

Afmetingen:

"standaard" : 25 mm (b) x 4,5 mtr (l)

"extra breed" : 50 mm (b) x 4,5 mtr (l)

Leverbaar in de volgende kleuren:

Goedgekeurd voor medisch gebruik door:



Food & Drug
Administration
USA

ROOD

BLAUW

BEIGE

ZWART

CAMOUFLAGE

TURQUOISE

WIT

GROEN



Stokvis Tapes Benelux BV

info@stokvistapes.nl

Tel. 078 699 21 00

Andere ResQ-producten:

ResQ-mold[®]
Versatile rubber product

ResQ-spray[®]
The agent against humidity

ResQ-tape[®]
Self-fusing silicone tape